



ピッグ-e マット

～電気コントロールユニット～

簡易版
説明書



言語・温度 設定変更

- ① ボタンを 5 秒：設定メニュー
- ② と ボタンを押して、切り替える
- ③ と ボタンを押して、設定を変更
- ④ ボタンを押して“Continue”を選択し、
 ボタンを押す

ワンタッチモード

- ① ・ ・ のボタンを押す
- ② ボタンを押す

カスタムモード

- ① ボタンを押す
- ② 日数（14-28）を選択
- ③ “Next”を選択して ボタンを押す
- ④ 開始温度（33-38）
・ 終了温度（25-28）を選択
- ⑤ “Start”を選択して ボタンを押す

ナーサリーモード

- ① ボタンを押す
- ② ボタンを“0 Days”が表示されるまで押す
- ③ 温度（25-38）を選択
- ④ “Start”を選択して ボタンを押す
- ⑤ ボタンを押し続けると電源が切れる



INNOCENT
株式会社 イノセント

〒889-1801
宮崎県都城市山之口町富吉 2592-5
Tel:0986-29-1120 Fax:0986-57-5700